

Micropigmentación



La micropigmentación es una técnica de maquillaje correctivo semipermanente. Esa cuestión debe quedar muy clara. El pigmento se eliminará por la función fisiológica de la fagocitosis, es decir, las células del tejido eliminan el pigmento.

Este proceso no es igual para cada persona. Es muy importante informar bien al cliente.

Esta especialidad aporta a la imagen cambios para mejorarla notablemente.

Permite dar un toque de color, resaltar o corregir rasgos, como labios, cejas o eye liner, evitando tener que realizar diariamente esos retoques.

Técnica de aplicación para cejas

- 1 Se realizará el trazado de la ceja ideal con un **lápiz de cejas** (pag. 26) que corresponda a la morfología del rostro, (forma de óvalos, ojos, mentón, maxilares) compensando las asimetrías faciales.
- 2 Se depilará el vello que no corresponda con el diseño **pinzas** (pag. 37).
- 3 Aplicación de insensibilizante por vía tópica.
- 4 Elegiremos la mezcla del pigmento, de acuerdo a la armonía deseada.
- 5 Se realizará la técnica "pelo a pelo" con **aguja de 1 punta** (pag. 74) a la profundidad del extracto basal (en la epidermis).
- 6 Aplicación del aceite **Germa-Vital Permanent Image** (pag. 65) cicatrizante, reestructurador celular y bactericida y se recomendará su uso en casa aplicándolo tres veces al día.



Técnica de aplicación para labios

- 1 Se lleva a cabo el diseño de labios con un **lápiz perfilador** (pag. 30), corrigiendo las asimetrías, aumentando el grosor del labio o disminuyéndolo en caso que sea necesario.
- 2 Se aplicará insensibilizante por vía tópica.
- 3 Realizaremos la elección del pigmento teniendo en cuenta la armonía natural y el color deseado a conseguir, desde el color natural a rojos, berenjena o varios marrones.
- 4 Comenzaremos la micropigmentación del perfilado de labios y proseguiremos el difuminado de la línea hacia la propia mucosa.
- 5 Aplicación del **Germa-Vital Permanent Image** (pag. 65).
- 6 **i!** Todo el material utilizado será desechable. La aplicación de esta técnica está regulada por cada Comunidad Autónoma.



Micropigmentación

Micronic colours. Pigmentos minerales

Registrados
en sanidad
R.D.G.F.
y P.S.



Pigmentos estabilizados, hipoalergénicos, inertes de solución estéril. Normativa FDA. Su gran calidad permite hacer maquillajes correctivos. Registrados en sanidad R.D.G.F. y P.S.

Presentación:

En envases de 10 ml. (17 colores)

Aplicación de colores y recomendaciones

Micronics de labios: geranium, cuero, rojo intenso, ciruela, bermellón, marrón veneciano.

Todos los micronics de labios se pueden mezclar entre sí. Un color intenso nunca puede aplicarse solo, se recomienda mezclarlo con un color base claro (cuero, rojo caribe o marrón veneciano).

Si la mucosa del labio es clara, aplicar como base un marrón veneciano.

Si la mucosa del labio es oscura, aplicar como base un rojo caribe.

Micronics de cejas: tabaco, ciruela, nogal

Micronic de eye liner: negro

El color base por excelencia es el beige claro. Pero no hay que abusar de él, ya que tiene una alta cantidad de micras grandes y tardará más en desaparecer.

Todo color, puede mezclarse con un poco de beige.

 PI03100 blanco	 PI03101 beige claro	 PI03195 geranium	 PI03196 cuero
 PI03197 tabaco	 PI03198 nogal	 PI03199 negro	 PI03207 rojo caribe
 PI03208 rojo intenso	 PI03209 naranja	 PI03210 ciruela	 PI03211 bermellón
 PI03301 rosa	 PI03300 amarillo	 PI03309 verde	 PI03310 azul
 PI03212 marrón veneciano			



Germa-Vital

Previene el envejecimiento cutáneo y funciona como un excelente regenerador cicatrizante.

Su acción bactericida y antiinflamatoria lo hace de gran utilidad en cualquier tratamiento de estética.

Envase 20 ml.

PI02303

Puede usarse en depilación eléctrica, micropigmentación, tatuaje, tratamiento de acné, depilación con cera, limpiezas de cutis y hasta higiene bucal.

Se aplica directamente o disuelto en tónico sin alcohol, según el caso.

Kits micropigmentación

Kit MicroStation

Innovador equipo para micropigmentación con regulación exacta de la progresión de velocidad. Permite trabajar con dos bolígrafos aplicadores alternativamente, lo que supone un gran ahorro de tiempo. Sistema de transmisión de martillo que garantiza la ausencia de vibraciones y mínima sensación de molestia. El pedal controla el encendido/apagado de la MicroStation, ofreciendo mayor comodidad de trabajo.


Contenido Kit:

- 1 aguja de 3 puntas
- agujas de 1 punta
- 1 aguja de 4 puntas plana
- 1 esponja, 1 anillo
- 4 contenedores mini
- 3 cabezas desechables (1-3 puntas)
- 3 cabezas desechables (4 puntas)

Obsequio:

- 1 maletín de combinación (pag. XX)

PI02004

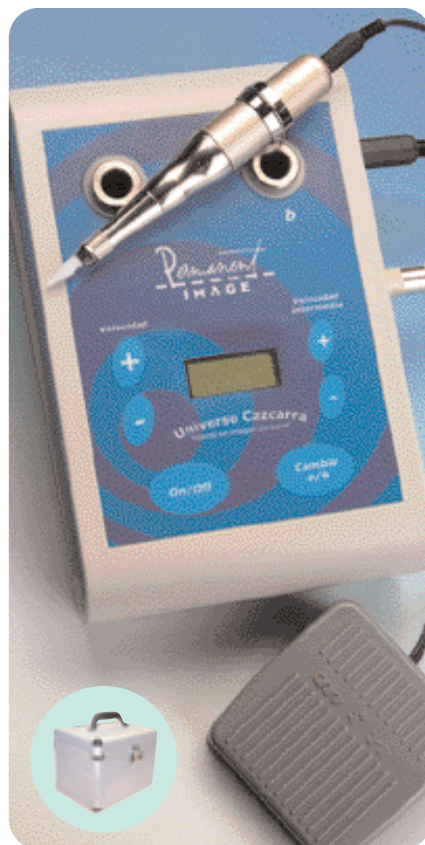

Kit Elite pack MicroStation

Este pack incluye el kit dermatográfico completo y 3 pigmentos a elegir.

Contenido Kit:

- 1 aguja de 3 puntas
- 3 agujas de 1 punta
- 1 aguja de 4 puntas plana
- 3 cabezas desechables (1-3 puntas)
- 3 cabezas desechables (4 puntas)
- 1 anillo
- 1 esponja
- 3 micronics a elegir

Obsequio:

- 4 Germavitales
- 100 contenedores mini para los pigmentos
- 1 maletín de combinación

PI02005



Máquina de micropigmentación MK Kit I

Máquina de micropigmentación de regulación variable.

Puede trabajar con agujas de hasta 8 y 12 puntas y agujas planas.

Su sistema de transmisión de martillo garantiza la ausencia de vibraciones y el desplazamiento lateral indeseado de la aguja. Esto permite una mayor precisión, mejor implantación del pigmento y que el cliente experimente la menor sensación de molestia.

PI02002



Máquina de micropigmentación MK Kit II Élite

La nueva máquina viene presentada en una práctica maleta profesional en plástico ABS que permite colocar 18 pigmentos y todo el material básico preciso para realizar un trabajo.

Este pack incluye el kit dermatográfico completo y 3 pigmentos.

Obsequio:

- 4 Germavitales
- 100 contenedores mini para los pigmentos.

PI02003

Complementos micropigmentación

Lámina

para practicar



La más sencilla de las maneras de iniciarse en la micropigmentación. Permite practicar las técnicas de este maquillaje semi-permanente antes de hacerlo sobre otros materiales y finalmente en la piel del cliente.

PI66054

Cabeza

para practicar



Esta cabeza de plástico duro es la base sobre la cual se encaja la máscara para realizar las prácticas. La cabeza se fija a una superficie estable, como una mesa, para poder utilizarse de manera cómoda. No incluye el soporte para la cabeza.

PI66052

Máscara

para practicar



Una máscara blanda para practicar la micropigmentación sobre una superficie con relieve que representa los rasgos de un rostro. Se utiliza sobre una cabeza de plástico duro que se fija a una superficie estable.

PI66053

Aguja 1 punta MK



Se venden en paquetes de 10 unidades.

PI02116

Aguja 3 puntas MK



Se venden en paquetes de 5 unidades.

PI02117

Aguja 4 puntas plana MK



Se venden en paquetes de 5 unidades.

PI02118

Cabezas desechables (1 y 3 puntas) MK



Se venden en paquetes de 10 unidades.

PI02119

Cabezas desechables planas (4 puntas) MK



Se venden en paquetes de 10 unidades.

PI02219

Kit de transmisión MK



Se venden en paquetes de 10 unidades.

PI02207

Complementos micropigmentación

Anillos soporte para contenedores



Anillo para la mano del profesional donde se sujetará el contenedor del pigmento que estamos utilizando. Se vende en bolsas de 2 unidades.

PI02205

Pedal MicroStation



Recambio.

PI02006

Anillo MK



Anillo para la mano del profesional donde se sujetará el contenedor del pigmento que estamos utilizando. Se vende en bolsas de 2 unidades.

PI02215

Porta contenedores



PI65100

Contenedores esterilizados



Contenedores de un solo uso para depositar el pigmento durante la micropigmentación. Empaquetados y esterilizados previamente para ganar tiempo durante el servicio. Estos contenedores siguen las más estrictas medidas de higiene.

Presentación:

2 conjuntos de 5 unidades.

PI02208



Contenedores

Grandes

Contenedores de un solo uso, para depositar el pigmento durante la micropigmentación. Se vende en bolsas de 20 unidades.

PI02201

Medianos

Contenedores de un solo uso, para depositar el pigmento durante la micropigmentación.

Medida: 14 mm

Se venden en bolsas de 100 unidades.

PI02212

Pequeños

Contenedores de un solo uso, para depositar el pigmento durante la micropigmentación.

Medida: 9 mm

Se venden en bolsas de 100 unidades.

PI02211

Pestañas

Kit permanente para pestañas



Presentado en envases individuales para una mayor conservación, el envase transparente permite conocer la cantidad de producto que hay en cada momento. El rizado que se obtiene es muy natural, dando una gran expresividad a la mirada. No daña el delicado pelo de las pestañas ni irrita los ojos.

Contenido:

3 de gel de permanente (PI01002)
3 de gel neutralizante (PI01003)
2 de loción regeneradora (PI01004)
2 de loción limpiadora (PI01005)
32 unidades de rulitos pequeños (PI01006)
32 unidades de rulitos medianos (PI01007)
Todos los productos del kit se presentan también de forma individual.

PI 01001

El adhesivo de rulitos no está incluido en este kit, pero es imprescindible para realizar esta técnica.



Técnica de aplicación de permanente para pestañas

- 1 Aplicar el adhesivo de rulitos el párpado superior, sobre el borde de la pestaña y colocar el rulito de acuerdo con la longitud de pestañas. Presionar el rulito contra el párpado, y a su vez la pestaña contra el rulito.
- 2 Aplicar el **gel permanente** sobre las pestañas. Tapar con papel osmótico la zona de los ojos. Sobre el papel aplicar una toalla y dejar actuar 15 minutos.
- 3 Tras ese tiempo, aplicar el **neutralizante** para fijar el moldeado.
- 4 Repetimos el papel osmótico y la toalla durante 10 minutos.
- 5 Limpiar con agua tibia y retiramos el rulito.
- 6 Aplicar la **loción limpiadora** para retirar los restos del adhesivo.
- 7 Aplicar la **loción regeneradora**.

Gel de permanente



Unidades de 8ml.

PI01002

Gel neutralizante



Unidades de 8ml.

PI01003

Loción regeneradora



Unidades de 8ml.

PI01004

Loción limpiadora



Unidades de 8ml.

PI01005

32 unidades en cada paquete.
Se venden en tres medidas:

PI01006

PI01007

PI01008



Para fijar las pestañas a los rulitos.
No se incluye en el kit.
3 envases de 4 ml.

PI01009

NOVEDAD

Es un sistema para aplicar pestañas de aspecto completamente natural, con el objetivo de lograr un marco más espeso a la mirada.
Su duración es entre una semana y 10 días.

PI92099

Contenido:
• Adhesivo pestañas
• Disolvente
• Mastic
• Pinzas coloca pestañas
• 1 x pestañas grupitos pequeñas
• 2 x pestañas grupitos medianas

Pegamento de gran adherencia que dura unos 10 días.

Contenido:
• Pegamento
• Disolvente

PI91000

Sistema rápido de tinte de pestañas.

Se aplica el papel protector debajo del ojo.
Se mezcla el tinte en crema y líquido estabilizador a partes iguales y se forma una pasta homogénea.

Se cubren los párpados con papel osmótico para que el calor actúe como reactivo.

Tras 20 minutos, con un palito se fricciona el tinte para que vaya cayendo y luego se aclara con agua.

Limpiaremos la zona con gel desmaquillador de ojos y ya está lista en caso que queramos proceder a maquillar.



PI11103
Marrón



PI11104
Negro



PI11105
Azul